



1 - Prima di riempire la siringa

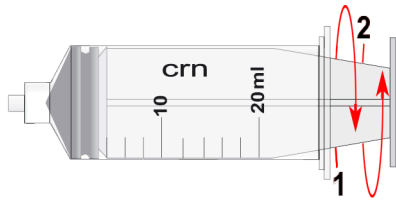

Svitare e riavvitare lo stelo dal pistone per facilitarne lo svitamento dopo il riempimento della siringa.

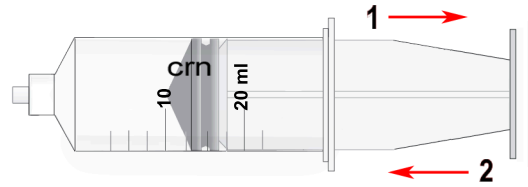

Far scorrere un paio di volte il pistone lungo il corpo siringa per distribuire il lubrificante lungo le pareti.

2 - Riempimento siringa


L'aspirazione del farmaco deve essere effettuata lentamente.

La siringa non deve essere riempita oltre il volume massimo consentito di 10 o 20 ml.


Lo stelo deve essere svitato con un movimento discretamente rapido.

3 - Innesto della siringa sulla pompa

Per evitare un possibile trafilamento di farmaco durante l'innesto della siringa sulla pompa si consiglia di collegare il set di infusione (in alternativa al tappo luer lock).

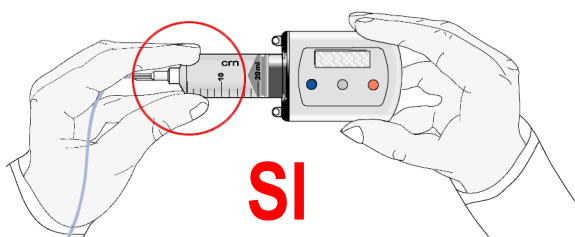

La siringa, nella fase di innesto sulla pompa, deve essere tenuta dall'estremità superiore del cilindro e non lungo le pareti.

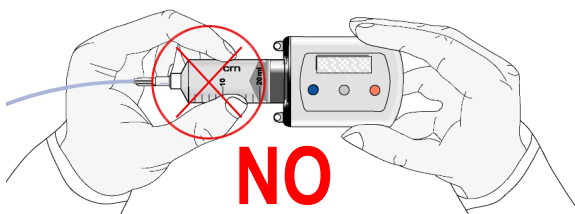

Evitare durante la connessione di esercitare una pressione sulle pareti della siringa poichè si potrebbero verificare perdite di farmaco dagli anelli del pistone.

Durante le operazioni di riempimento siringa e innesto sulla pompa è possibile che si verifichi un leggero trafilamento di farmaco tra il primo ed il secondo anello di tenuta del pistone di gomma: tale condizione non compromette né il corretto funzionamento della siringa né l'erogazione del farmaco.