

1. Inserire sulla siringa l'ago in dotazione ruotandolo in senso orario.
2. Riempire la siringa aspirando lentamente il liquido (per evitare sconnessioni tra pistone di gomma e stelo) e verificare che il farmaco in essa contenuto non superi la capacità della siringa utilizzata (10 o 20 ml).
3. Inserire sulla siringa il tappo luer-lock e svitare lo stelo della siringa ruotandolo in senso antiorario con un movimento discretamente rapido.

4. Innestare la siringa sulla pompa con una rotazione di 90°, uno scatto conferma il bloccaggio.
5. Innestare sulla siringa il cono del set di infusione. **La valvola rappresenta un ulteriore dispositivo di sicurezza, volto ad evitare il verificarsi di flusso libero, qualora il pistone della siringa non venga innestato sullo spintore della pompa.**

**ATTENZIONE**  
Il pistone non deve essere tolto dalla siringa



Specifiche tecniche	
Pressione di apertura (cracking pressure)	3.5 PSI +/- 1
Pressione negativa	> 45 PSI
Flusso @ 5 PSI	203 ml/min
Posizione statica	Chiuso
Applicazioni	Liquidi